



たよレールSOTOEと わたレールEKの 連結について

下記の **×** が付いている組合せで
連結しないでください。
安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

たよレールSOTOE

標準型

単体使用



BZK-01

スリム型

単体使用




BZK-03



BZK-04

わたレールEK


BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK

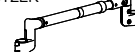

平坦部での連結条件

●連結しているうち、最低1台は標準型を使用する(スリム型のみで連結しない)。


○ 標準型のみ連結

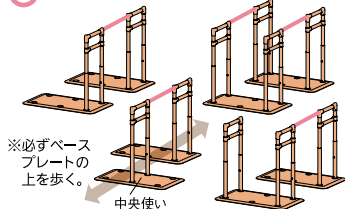


※必ずベース
プレートの
上を歩く。

中央使い


○ 標準型+スリム型

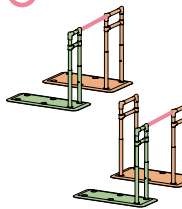


× スリム型のみ連結

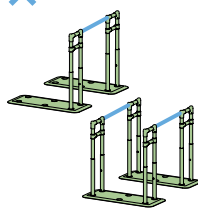


× 動線が
ベースプレートの
上にこない

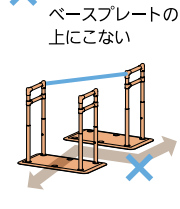

●左記の条件をクリアしていれば
段差部でも取付け可能です。


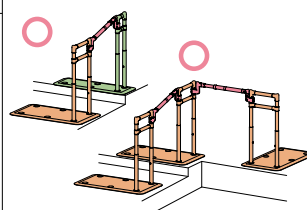


●左記の条件をクリアしていれば
何台でも連結可能です。


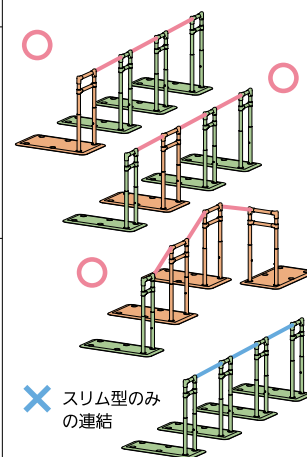


× スリム型のみ
の連結


●スリム型とわたレールで「曲がり角」を作らない。

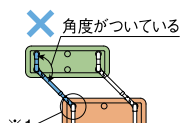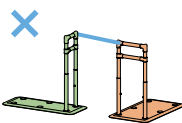

※1

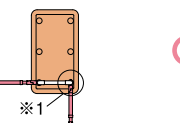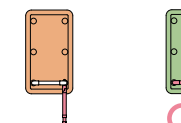

※1

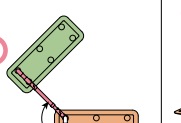


※1

※1：標準型手すりとわたレールの連結には角度をつけられます。ただし、手すりの角度は90°以上にします。

ただし以下の条件を満たす場合のみ、スリム型とわたレールで「曲がり角」を作ってもよい。

①3台以上の両手すりを連結する場合

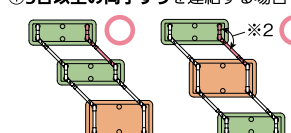

②3台以上の片手すりで連結し、
スリム型が中間に
くる場合



※2：90°以上あれば角度がついてもよい。


わたレールEKで連結した場合の格差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、
取付け角度は0°～45°の間で自由に調節できます。
下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて
使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうこと
が確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなり
すぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できる
BZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A 手すり長さ	570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm
B 伸縮部の長さ	426mm	556mm	756mm	1056mm	1456mm
C 対応段差高さ (最大は取付け角度が45°のとき)	0～301mm	0～393mm	0～534mm	0～746mm	0～1029mm
D ベースプレート間の 距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm	1050mm
	角度45°	295mm	387mm	528mm	740mm
E わたレールEKの対応範囲	BZW-7057EK				
	570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm

わたレールEKの
勾配は45°以下

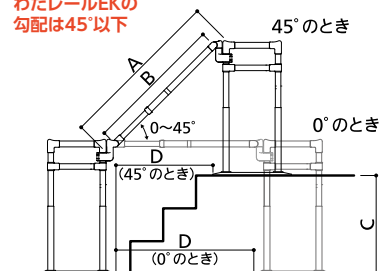

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。



BZK-01 (片手すり)
01265-000248



BZK-02 (両手すり)
01265-000251



BZK-03 (片手すりスリム)
01265-000259



BZK-04 (両手すりスリム)
01265-000261



「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。



BZK-01S-7057
BZK-01S-9070
01265-000250



BZK-02S-7057
BZK-02S-9070
01265-000252



BZK-01W-7057
BZK-01W-9070
01265-000249



BZK-02W-7057
BZK-02W-9070
01265-000253



BZK-01SW-7057
BZK-01SW-9070
01265-000256



BZK-02S1-7057
BZK-02S1-9070
01265-000263




BZK-02SW-7057
BZK-02SW-9070
01265-000257



BZK-03S-7057
BZK-03S-9070
01265-000260




BZK-04S1-7057
BZK-04S1-9070
01265-000264

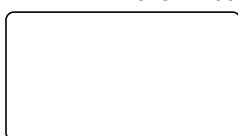

BZK-04S-7057
BZK-04S-9070
01265-000262



BZK-0103W-7057
BZK-0103W-9070
01265-000265

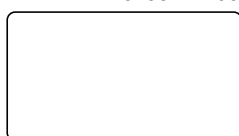

BZK-0204W-7057
BZK-0204W-9070
01265-000266



たよレール SOTOE

わたレールEK連結使用例



オプション わたレールEK 伸縮タイプ



7057,9070,1290 TAIS:01265-000255
1612 TAIS:01265-000303

手すり部:φ30、φ36

BZW-7057EK:伸縮範囲:57~70cm

BZW-9070EK:伸縮範囲:70~90cm

BZW-1290EK:伸縮範囲:90~120cm

BZW-1612EK:伸縮範囲:120~160cm

「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。


わたレールEK BZW-1612EK 組み合わせ



たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)




01265-000304 BZK-01S-1612

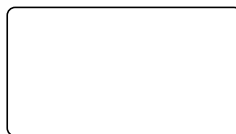

たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)



01265-000306 BZK-02S-1612

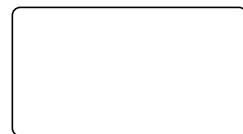

たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
+
たよレールSOTOE
片手すり・標準型



01265-000310 BZK-01W-1612



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
+
たよレールSOTOE
両手すり・標準型



01265-000311 BZK-02W-1612



たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)



01265-000305 BZK-02S1-1612



たよレールSOTOE
片手すり・スリム型
+
わたレールEK (1台)




01265-000307 BZK-03S-1612



たよレールSOTOE
両手すり・スリム型
+
わたレールEK (1台)




01265-000308 BZK-04S1-1612

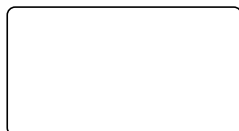

たよレールSOTOE
両手すり・スリム型
+
わたレールEK (2台)




01265-000309 BZK-04S-1612

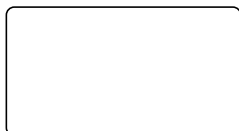

たよレールSOTOE
片手すり・標準型
+
わたレールEK (1台)
+
たよレールSOTOE
片手すり・スリム型




01265-000312 BZK-0103W-1612

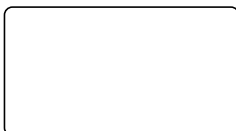

たよレールSOTOE
両手すり・標準型
+
わたレールEK (2台)
+
たよレールSOTOE
両手すり・スリム型




01265-000313 BZK-0204W-1612

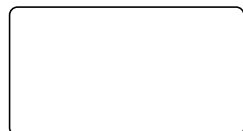

基本セット

T型ベース・丸型ベース・丸型ベース耐水

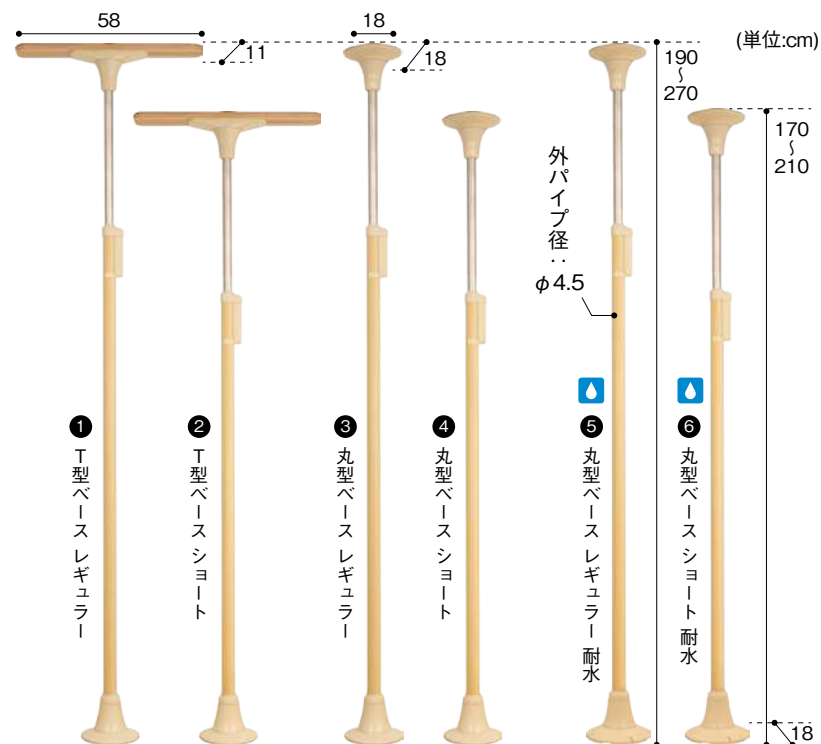

① T型ベース レギュラー
BPZ-100-50
00254-000416

② T型ベース ショート
BPZ-100-60
00254-000418

③ 丸型ベース レギュラー
BPZ-100-10
00254-000410

④ 丸型ベース ショート
BPZ-100-20
00254-000412

⑤ 丸型ベース レギュラー 耐水
BPZ-100-80
00254-000422

⑥ 丸型ベース ショート 耐水
BPZ-100-81
00254-000423



T型の天井ベースは、プレート
をズラして設置すること
が可能です。



▲ 耐水対応 バランダや玄関ポーチ等雨に濡れるような場所にも対応している商品です。⚠浴室では使用できません。

最小限の圧力で突っ張り、容易に設置。さらに安心機能を追加しました。



締付が容易になった
伸びるロックレバー




Wロック機能となる
専用垂直器が標準装備



蓄光リングが
標準装備で
夜間でも安心

ツイン手すり W+D


ウェーブ型手すりロングとD型手すりを
角度90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動に対応

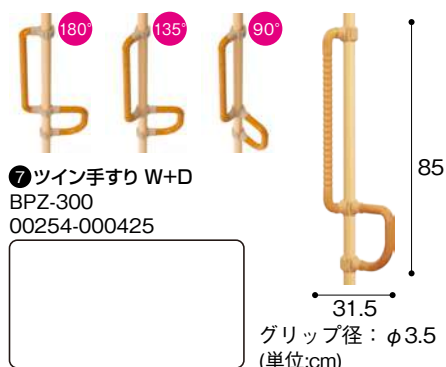

⑦ ツイン手すり W+D
BPZ-300
00254-000425

ツイン手すり W+W


ウェーブ型手すりロング2本を
角度90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動に対応

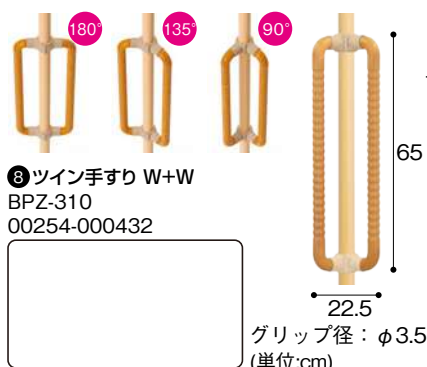

⑧ ツイン手すり W+W
BPZ-310
00254-000432

プッシュ手すり

縦・横に組替え、位置ずらしが可能。
手のひらや前腕部、寄り掛かりなどの
面受けに対応

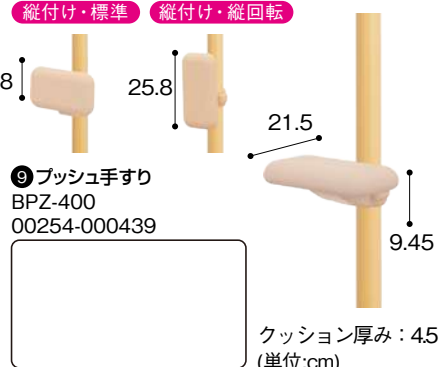

⑨ プッシュ手すり
BPZ-400
00254-000439

クッション厚み：4.5
(単位:cm)


b型手すり ロング

立ち上がりの重心移動を誘導
立位姿勢保持も上部でサポート

⑩b型手すりロング
BPE-300-100
00254-000368



グリップ径: φ3.5 (単位:cm)

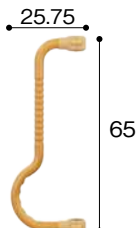


D型手すり

引っ張り+プッシュアップ
立ち座りや姿勢保持に最適

⑪D型手すり
BPE-300-110
00254-000369



グリップ径: φ3.5 (単位:cm)

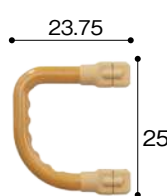


円型手すり

移乗方向に制約がかからず方向転換補助に適した手すりです。

⑫円型手すり
BPE-300-20
00254-000131



グリップ径: φ3.5 (単位:cm)

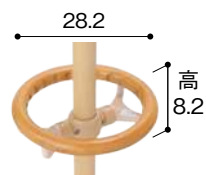


ウェーブ型手すり ロング

立ち上がりや段差昇降などの動作や
移動をサポートできます。

⑬ウェーブ型手すり ロング
BPE-300-40
00254-000133



グリップ径: φ3.5 (単位:cm)

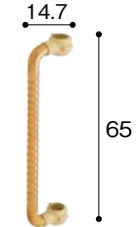


グリップアーム 5P

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。

⑭グリップアーム 5P
BPE-300-60
00254-000143



グリップ径: φ3.5 (単位:cm)

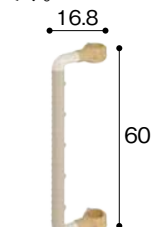


玄関アーム レギュラー

段差のあるところで使えるようになる
出幅のコンパクトな手すりです。

⑮玄関アーム レギュラー
BPE-500-10
00254-000360



付属 (丸グリップ・シリコン滑り止めシート)

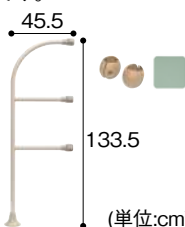

システム伸縮手すり 固定セット

角度が90°・135°・180°に組替え可能
移乗、立ち上がり、移動に対応

⑯ 600~900 伸縮範囲: 30



芯々: 60~90

⑰ 900~1200 伸縮範囲: 30



芯々: 90~120

手すり径: φ3.4、φ4.0 (単位:cm)

システム伸縮手すり 曲げセット

両側のブラケットの角度(縦横可)を変えるこ
とで、手すりに傾斜を付けます。

⑱ 600~900 伸縮範囲: 30



芯々: 70~100

⑲ 900~1200 伸縮範囲: 30



芯々: 100~130

手すり径: φ3.4、φ4.0 (単位:cm)

システム木手すり 跳ね上げセット

出入口やクローゼット等の前では、跳ね上げて
動線を確保することができます。

⑳ 600 芯々: 70



芯々: 100

㉑ 900 芯々: 130



手すり径: φ3.5 (単位:cm)

付属 (手すりホルダー)

⑯システム伸縮手すり
固定セット600~900
SBR-30-609
00254-000169



⑱システム伸縮手すり
曲げセット600~900
SBR-40-609
00254-000171



⑳システム木手すり
跳ね上げセット600
SBR-70-060
00254-000115



㉑システム木手すり
跳ね上げセット900
SBR-70-090
00254-000064



㉒システム木手すり
跳ね上げセット1200
SBR-70-120
00254-000119



⑰システム伸縮手すり
固定セット900~1200
SBR-30-912
00254-000170




⑲システム伸縮手すり
曲げセット900~1200
SBR-40-912
00254-000172



システム手すりは

組合せることで
自由に拡張できます


伸縮手すりの
固定セット+曲げセット
を組み合わせた例

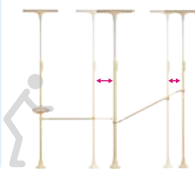

跳ね上げ手すりは

ご家族の生活動線を
そのまま保てます

手すりの開閉によって
生活動線を保つことが
できます。

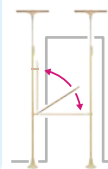



バディー 突っ張ることによってしっかりと固定できる垂直型手すり (工事不要)




 設置場所に 制限がない場合に 十字型ストッパー	 壁際に設置する場合に ※梁のある場所に 設置してください I型ストッパー	 トイレなど狭い場所 に設置する場合に ※梁のある場所に 設置してください 丸型ストッパー
 ■天井側 壁(端)にぴったり付けたい場合に最適 ※梁のある場所に 設置してください I型ストッパー2ヶ ■床側 壁と手すりの距離 約4cm	 ■天井側 部屋の角(隅)にぴったり付けたい ※梁のある場所に 設置してください コーナーストッパー ■床側 壁と手すりの距離 約4cm	

クロスバー

歩行動作をサポート。複数本の連結も可能。



浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

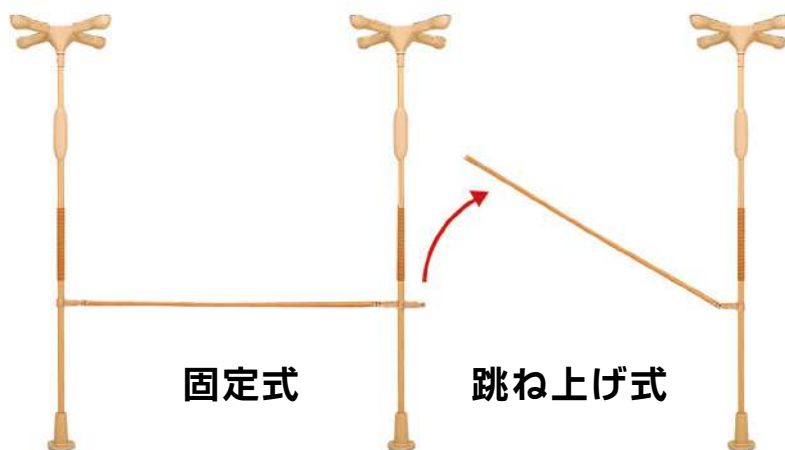


バディー ノーマルタイプ十字型
MNTCM
バディー ノーマルタイプ I 型
MNTCMIS
バディー ノーマルタイプ丸型
MNTCMRCS

00054-000054



バディー(コーナーストッパー仕様)
MNTCMCRS
00054-000467
バディー(I型ストッパー2ヶ仕様)
MNTCMISW
00054-000468

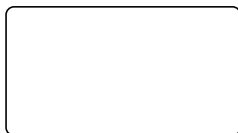

固定式(40cmタイプ)
MNTCM03BE004
00054-000337



固定式(60cmタイプ)
MNTCM03BE006
00054-000338



跳ね上げ式(90cmタイプ)
MNTCM02BE009
00054-000333



サイドバー

立ち座りや寝返り動作をサポート。



MNTCM01LB
00054-000055



跳ね上げ式(1.2mタイプ)
MNTCM02BE012
00054-000334




跳ね上げ式(1.6mタイプ)
MNTCM02BE016
00054-000335




跳ね上げ式(2.0mタイプ)
MNTCM02BE020
00054-000336




ルーツ サイドタイプ／センタータイプ／コーナータイプ／ロングタイプ／スモールタイプ(両手すり)

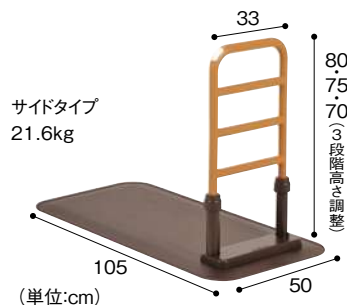



サイドタイプ MNTPLBR
00054-000116

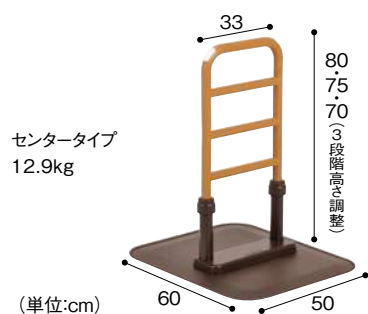


センタータイプ MNTPSBR
00054-000117

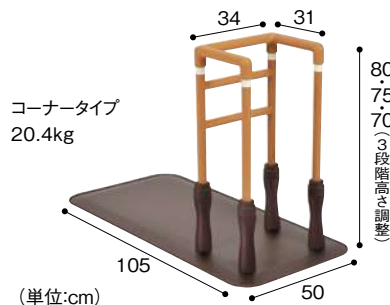

コーナータイプ MNTPCBRB
00054-000132

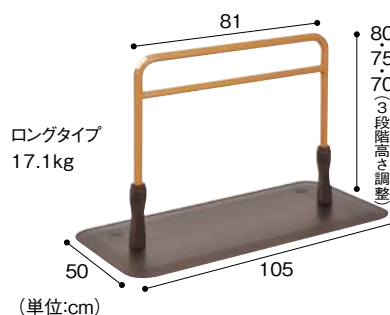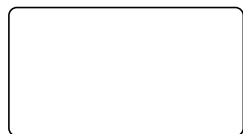

ロングタイプ MNTPLGBR
00054-000133

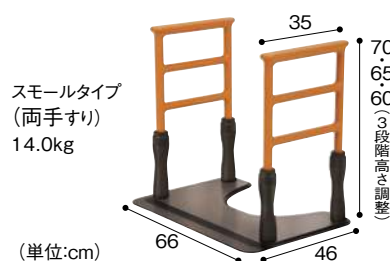

スモールタイプ(両手すり) MNTPT2
00054-000217



特長 安定感に優れた、シンプル形状の床置き型手すり。
手すり内側の空間は、頭が入らない安全寸法です。



ルーツ同士を連結できるようになりました。



ロングタイプ + クロスバー + センタータイプ

連結する場合は、
【クロスバー取り付けブラケット】を
使用してください。




下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど
安全上の理由から使用できません。

警告

ルーツ センタータイプが複数設置される場合
【ルーツ センタータイプ+クロスバー+ルーツ センタータイプ】

〈一例〉

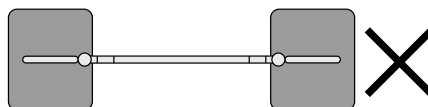

バディーだけでなく、ルーツも クロスバーに連結できるようになりました。




下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど
安全上の理由から使用できません。

警告

中央にルーツ センタータイプが設置される場合

【バディー+クロスバー+ルーツセンタータイプ+
クロスバー+ ルーツ ロングタイプ】

〈一例〉

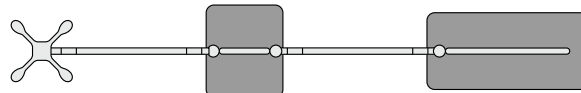



よかレール

膝、腰に負担をかけない
立ち上がり動作をお手伝いします。




センタータイプ マット付
PJ01-ASM1
00631-000726

(単位:cm)



サイドタイプ マット付
PJ01-ALM1
00631-000727

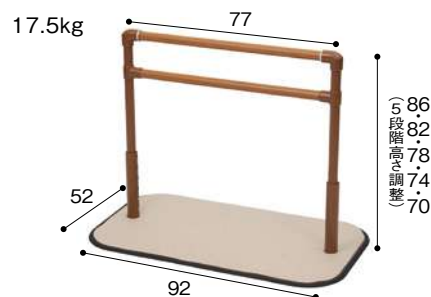


ロングタイプ マット付
PJ01-BLM1
00631-000728



コーナータイプ マット付
PJ01-CSM1
00631-000730

よかレールストッパー

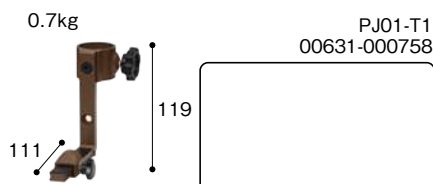

よかオモシ




yazaki たちあっぷⅡ CKA-24

重量:18.4kg
(単位:cm)



00055-000207

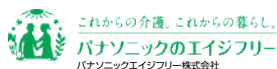

スタンディ



PN-L80401
00980-000315



BS小桜 NEW

高位置指示で屋内・屋外でも使えます



01235-000251



株式会社 **ミコク** BS小路



01235-000250




推奨段差0~15cm
最大調整範囲26cm

オプション


BS小路 ステップ台
重量 10kg

高さ調節3段階 (10・12.5・15cm)

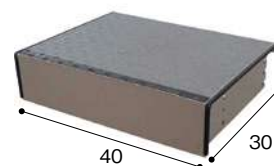


01235-000279

yazaki あがりかまち用 **たちあっぷ**
矢崎化工株式会社

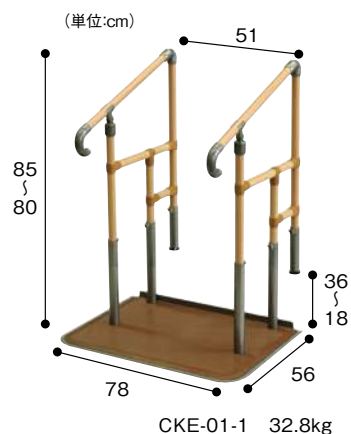

CKE-01-1 (両手すり)
00055-000109
CKE-01 (両手すりステップ台付)
00055-000105

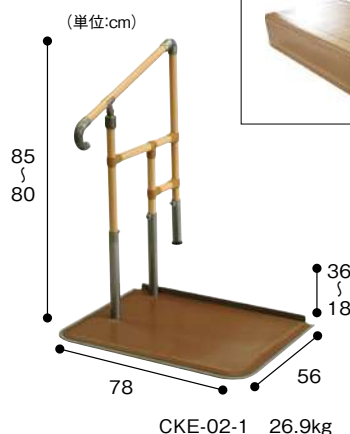

CKE-02-1 (片手すり)
00055-000110
CKE-02 (片手すりステップ台付)
00055-000106


オプション

かまちステップ台CKE-B

重量6.9kg
高さ調節4段階
(12・14・16・18cm)




yazaki **たちあっぷ 540**
矢崎化工株式会社

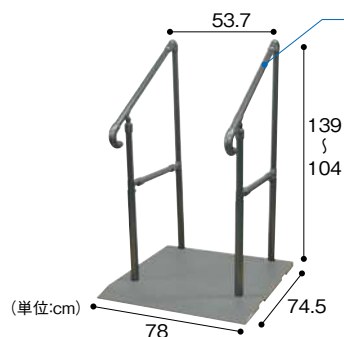

**握りやすい
ディンプル(くぼみ)形状**

CKH-01 (両手すり)
重量:34.7kg
00055-000127

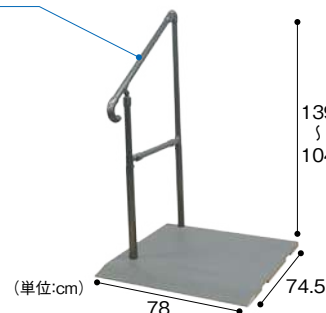


CKH-02 (片手すり)
重量:28.6kg
00055-000128

オプション

**たちあっぷ540
専用ステップ台**

※ステップ台 CKH-BH は、必ず CKH-BL と組み合わせてベースに取り付けてください。

ステップ台CKH-BHは、最低高さでも240mmとなり、安全な昇降が困難になります。CKH-BHを1台のみでは使用しないでください。

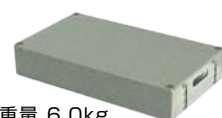

重量 6.0kg
高さ調整4段階
(9・11・13・15cm)

CKH-BL



重量 9.6kg
高さ調整4段階
(21・25・29・33cm)


CKH-BH



つながる置き型手すり NEW



手すりがピッタリつながるので
使い方や置き場所に合わせて
自在な組み合わせが可能です。

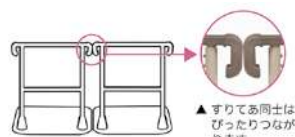

ST-1
00837-000011




ST-2
00837-000012



オプション

踏み台
重量 9kg

1.8cmピッチ高さ調節5段階

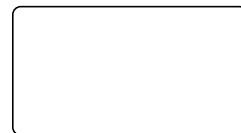

これからの介護、これからの暮らし。
パナソニックのエイジフリー
パナソニックエイジフリー株式会社

スムーディー両手・片手


NEW



ベースカバーに消臭剤が練りこまれています



00980-000431

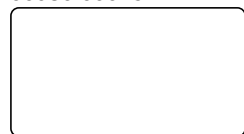

00980-000432




これからの介護、これからの暮らし。
パナソニックのエイジフリー
パナソニックエイジフリー株式会社

洋式トイレ用 スライド手すり



幅65×奥46×高58~74cm
肘掛け高
58~74cm (2cmピッチ9段階)

PN-L53001
00980-000191

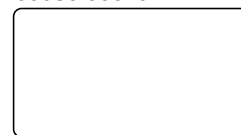

幅26cm~40cmのトイレ対応



洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2


アロン化成株式会社



木製

幅66×奥55×高55~70cm
高さ 6段階調節
55・58・61・64・67・70cm

木製ひじかけ
533-087
00221-000450

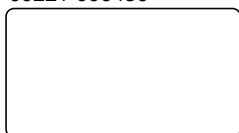

幅14cm~40cmのトイレ対応



洋式トイレ用ベストサポート手すり



幅62~72cm
(左右5cmずつ無段階調節)
×奥行46×高56~71cm
(3cm毎6段階調節)

627-010
01235-000008

